



Gebrauchsanweisung:

Meerwasser Schnupfenspray

Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung – Bitte sorgfältig lesen!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsanweisung und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke.

Zweckbestimmung:

Zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenschleimhaut bei trockener oder staub- und pollenbelasteter Nase.

Zusammensetzung:

Was ist in Meerwasser Schnupfenspray enthalten?

1 ml Lösung enthält: 1 ml isotonische Meersalzlösung entsprechend einer 0,9%-igen Natriumchloridlösung, bestehend aus Meersalzlösung, Eucalyptusöl, Minzöl, Gummi Arabicum, Citronensäure.

Hinweis:

Ohne Konservierungsmittel

Darreichungsform und Inhalt:

Was ist Meerwasser Schnupfenspray und wofür wird es angewendet?
Dosierspray mit 20 ml Lösung zum Einsprühen in die Nase.

Anwendungsgebiete:

Wann wird Meerwasser Schnupfenspray angewendet?

- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut bei trockener Nase
- Zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei vermehrter Belastung mit Pollen und Hausstaub
- Zur unterstützenden Behandlung bei Schnupfen und Heuschnupfen
- Zur unterstützenden Behandlung bei Erkrankungen der oberen Atemwege (Nasenhöhlen und Nasennebenhöhlen)

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Meerwasser Schnupfenspray nicht anwenden?

Meerwasser Schnupfenspray darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch/überempfindlich gegen einen der unter „Zusammensetzung“ genannten Bestandteile dieses Medizinproduktes sind. Das Produkt enthält die Allergene Limonen, Linalool, Citronellol, Eugenol.

Für Kinder unter 6 Jahren ist das Medizinprodukt nicht geeignet, da es zu Bronchospasmen und asthmaähnlichen Zuständen führen kann.

Darf Meerwasser Schnupfenspray in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes ärztliches Fachpersonal um Rat.

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Nach Nasenoperationen oder Unfällen sollte vor der Anwendung der Rat ärztlichen Fachpersonals eingeholt werden.

Vor der ersten Benutzung die Flasche schütteln und mit der Öffnung nach oben halten. Das Spraysystem mehrmals betätigen. Bei Austritt eines gleichmäßigen Sprühnebels ist das Produkt einsatzbereit. Die Flasche bei Benutzung möglichst senkrecht halten. Das Spray über Kreuz sprühen, das heißt mit der rechten Hand ins linke Nasenloch und andersherum, sodass das Spray beim Sprühen in Richtung Ohr zeigt. Im Anschluss das andere Nasenloch, in das nicht gesprüht wurde, schließen und leicht einatmen.

Trotz des speziellen Spraysystems mit eingebautem Filter empfehlen wir aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen, jede Dosiereinheit nur von einer Person zu benutzen. Nach der Anwendung empfiehlt es sich daher auch, den Nasenadapter abzuwischen und trocken zu halten. Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Behältnis.

Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion des Applikationssystems über die Anwendungsdauer zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Füllmenge berücksichtigt.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren sollte nur unter Aufsicht Erwachsener stattfinden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Meerwasser Schnupfenspray anwenden?

- Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene: 1 - 2 Sprüßstöße anwenden.
- Bis zu 10 mal täglich nach Bedarf in jedes Nasenloch geben und dabei leicht durch die Nase einatmen (0,14 ml je Sprüßstoß).
- Bei gleichzeitiger Behandlung mit anderen Produkten im Nasenbereich sollten Sie Meerwasser Schnupfenspray eine Stunde vorher anwenden.

Wie lange sollten Sie Meerwasser Schnupfenspray anwenden?

- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, sollten Sie ärztliches Fachpersonal aufsuchen.
- Bei Bedarf kann Meerwasser Schnupfenspray bis zum Abklingen der Beschwerden, d. h. maximal 30 Tage verwendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Meerwasser Schnupfenspray angewendet haben, als Sie sollten:

Vergiftungen und Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Ein leichtes Brennen in der Nase kann nicht ausgeschlossen werden. In sehr seltenen Fällen kann es zu Nasenbluten kommen. In Einzelfällen kann auch eine Unverträglichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen des Meerwasser Schnupfensprays auftreten.


Die Quantifizierung der Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen / schwerwiegenden Vorkommnissen:

Wenn Sie Nebenwirkungen oder eine im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt stehende Verschlechterung des Gesundheitszustands bemerken, wenden Sie sich an die unter „Hersteller“ angegebene Adresse. Schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der/die Anwender/in und/oder Patient/in niedergelassen ist, zu melden. Dies gilt auch für Nebenwirkungen / schwerwiegende Vorkommnisse, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinproduktes zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes

Meerwasser Schnupfenspray darf nur bis zu dem auf dem Etikett und der Faltschachtel mit  „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Nach Anbruch nicht länger als 6 Monate verwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!



Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG
Industriestraße 6
52457 Aldenhoven



**Zur Meldung von Nebenwirkungen
und Feedback können Sie folgenden
QR-Code scannen.**

Alternativ erreichen Sie das Formular auch unter
<https://pharma-aldenhoven.de/nebenwirkungen/>.



Stand der Information: April 2025